

快速操作指南

一、按键功能



Home 键：返回上级菜单或主界面。




旋钮：操作菜单。



启动/停止键：启动/停止通气。

二、安装呼吸机

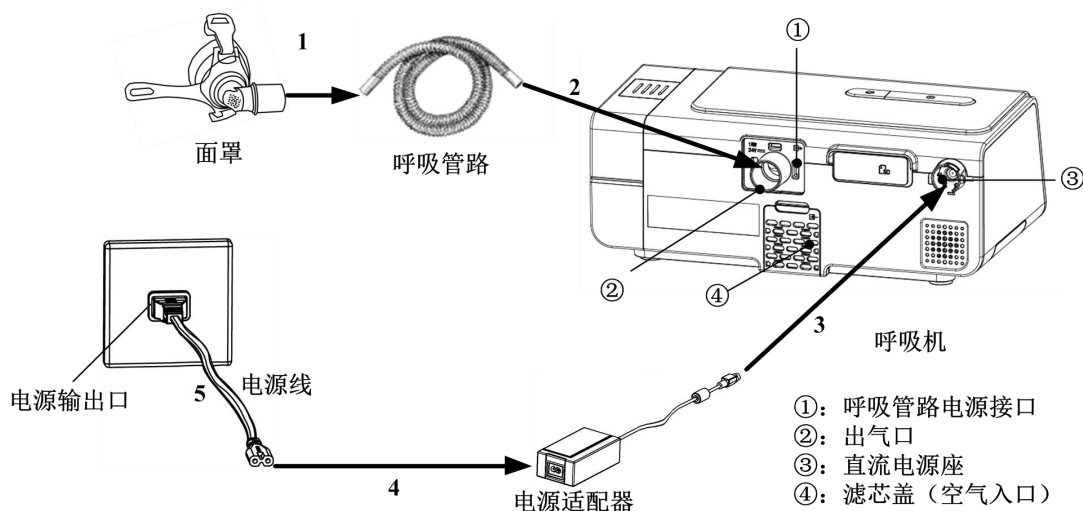

1. 将管路或具有加热功能的呼吸管路一端连接至组装好的面罩上。
2. 将管路另一端牢固地连接至呼吸机的出气口（②）。若使用具有加热功能的呼吸管路，需将呼吸管路的电源插头呼吸机的呼吸管路电源接口（①）对齐，捏住呼吸供气设备接头两侧的按扣，将其连接至呼吸机的出气口（②）。
3. 将电源适配器连接至呼吸机的直流电源座（③）。
4. 连接电源线与电源适配器。
5. 将电源线的另一端插入电源输出口。

注：1. 当拆卸具有加热功能的呼吸管路时，需捏住呼吸供气设备接头两侧的按扣，将其与出气口断开连接。

2. 更换空气滤芯时，需注意将空气滤芯与呼吸机进气口位置对齐。

三、连接 App

1. Mini 系列呼吸机控制软件支持 Android™（安卓）和 iOS（苹果）操作系统。使用智能设备（智能手机或平板电脑）通过软件商城（请搜索“LightTrip”）或扫描右方二维码下载此软件。下载完成后启动软件，注册账号并登录后即可使用。



2. 接通电源后，打开**设置**菜单，选择**蓝牙™**选项开启蓝牙无线功能。此时显示屏状态栏的蓝牙图标开始闪烁，呼吸机处于待连接状态；

3. 打开智能设备上的“Mini 系列呼吸机控制软件”，点击**蓝牙按钮**  启动设备搜索。在设备列表中选择以“BMC_P5”开头的设备名称(名称应与设备铭牌上的**设备序列号**一致), 进行配对连接。

4. 上述操作完成后，设备与软件通过蓝牙无线技术连接成功，显示屏状态栏的蓝牙图标将保持常亮。

四、设置工作参数

1. 呼吸机上电后，将显示主页面（如下左图所示）。“Mini 系列呼吸机控制软件”成功连接呼吸机后，App 主界面如下右图所示。



呼吸机主页面



App 主界面


2. 在呼吸机主页面中，通过**旋钮**  或使用触摸屏选择**设置**图标 ，打开**设置**菜单。App 端点击**参数设置**，即可进入参数设置界面。



3. 通过**旋钮**  或使用触摸屏在**设置**菜单中选择需要设置的参数，进入参数调节界面。App 端可通过点击选项进入参数调节界面。



4. 修改参数后，点击**确认**，确认设置并退出参数设置界面。App 端可通过点击**确定**，确认设置；点击**保存**后，通过左上角的**返回**图标  退出参数设置界面。

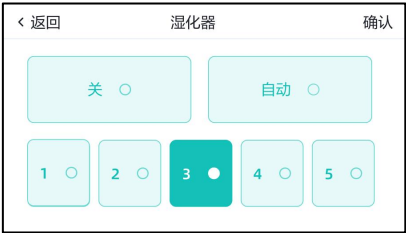

五、启动治疗

参数设置完成后，返回主页面。可按下呼吸机的**启动/停止键** ，或点击 App 主界面的 ，启动通气。

注意：“蓝牙™”字样及标识是 Bluetooth SIG, Inc. 公司所有的注册商标，北京瑞迈特医疗科技股份有限公司对此标志的任何使用都处于许可范围之内。其他商标和商品名称属于其各自的所有者。